

## CONECTOR VALVULADO LIVRE DE AGULHA INFUSÃO

### MODO DE USO DO PRODUTO

- Observar se a embalagem esta íntegra, intacta e se o produto está dentro de sua data de validade garantida. Caso haja qualquer desvio desta natureza, descartar o produto conforme protocolo da Instituição e ou determinação da legislação em vigor;
- Abrir a embalagem usando técnica asséptica para este propósito, conforme protocolo da Instituição e em conformidade com a legislação vigente;
- A Infusão recomenda desinfectar o septo de silicone grau médico usando gaze estéril embebida em álcool a 70% ou outro produto especificamente destinado a este procedimento; deixar secar o álcool completamente e naturalmente, sempre observando o protocolo da Instituição;
- Conectar uma seringa ou outro dispositivo provido de Luer macho, previamente preenchido com solução salina, diretamente no septo de silicone grau médico pressionando e girando em movimento rotatório no sentido horário até a conexão estar perfeitamente segura;
- Preencher o prime do Conector Valvulado livre de agulhas Infusão com a solução da seringa ou de outro dispositivo Luer macho até eliminar totalmente o ar do interior do Conector livre de agulhas Infusão; usar técnica de preenchimento de prime de acordo com o protocolo aprovada pela Instituição;
- Remover a tampa protetora do Conector Valvulado livre de agulhas Infusão e imediatamente proceder com a conexão do mesmo ao dispositivo onde o Conector livre de agulhas será utilizado;
- Ao usar uma seringa para o preenchimento do prime e eliminação do ar no Conector livre de agulhas Infusão, remover a seringa do mesmo usando movimento rotatório anti-horário até sua completa desconexão;
- A cada uso para infundir ou aspirar fluidos do Conector Valvulado livre de agulha Infusão, primeiramente fazer a desinfecção do septo de silicone de grau médico conforme descrito acima, inclusive quando for utilizada técnica de "flushing" (lavagem) para a manutenção da permeabilidade dos dispositivos;

- Fazer "flushing" (lavagem) no Conector Valvulado livre de agulhas Infusão imediatamente a cada infusão e ou aspiração de fluidos, observando o protocolo da Instituição;
- Descartar os produtos e embalagens usados neste procedimento sempre em recipientes destinados a este propósito, sempre observando os protocolos da Instituição em conformidade com a legislação vigente;
- Proceder com a troca do Conector Valvulado livre de agulhas Infusão de acordo com o protocolo aprovado pela Instituição e ou legislação em vigor, sempre observando o tipo de fluidos que serão infundidos e ou aspirados;
- O Conector livre de agulhas Infusão é compatível com conexões Luer padrão ABNT ISO 594 (Parte 1 e 2):2003;
- O Conector livre de agulhas Infusão é compatível em uso com Ressonância Magnética;
- O Conector livre de agulhas Infusão é compatível com Alcoóis, Citostáticos, Hemoderivados e Lipídios;
- O Conector livre de agulhas Infusão é livre de: DEHP (Di 2-etilhexil Ftalato), PVC (Policloreto de Polivinila), LÁTEX e METAIS.

## CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

- Temperatura: +10°C a +40°C
- Umidade Relativa: 30% a 85%
- Empilhamento máximo de 10 (dez) caixas
- Conservar o produto em local limpo e seco.
- Não submeter as caixas contendo os produtos a impactos, pois pode danificar os produtos;
- A Infusão mantém procedimentos para manuseio, armazenamento, embalagem e expedição de produtos finais, a fim de assegurar que as atividades relacionadas sejam executadas de forma a evitar danos ou deterioração do produto.
- Devem ser transportados em veículos seguros e apropriados, de modo a garantir a inviolabilidade e a integridade das embalagens.

## CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO, ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

- Usar técnicas assépticas previamente para uso do produto;
- O Conector Valvulado livre de agulha Infusão é produzido embalado e esterilizado, portanto em sua embalagem primária o produto está estéril, atóxico e isento de pirogênio. A partir de aberto o Septo de silicone grau-médico precisa ser desinfectado com álcool a 70% conforme descrito no Item 4.2.3 deste formulário;
- Caso a validade do produto esteja vencida ou a sua embalagem não esteja íntegra e intacta, descartar o Conector Valvulado livre de agulha Infusão em recipientes apropriados para esta finalidade e, conforme descrito no Item 4.2.3 deste formulário;
- Abrir a embalagem primária somente na hora do uso e utilizá-lo em local adequado;
- Para garantir o perfeito funcionamento do produto e sua integridade, seguir cuidadosamente as instruções de uso;
- Não usar cânula e /ou agulhas metálicas ou de qualquer outro tipo para acessar o Conector livre de agulhas Infusão; o uso de tais produtos danificará o Septo de silicone grau-médico e, conseqüentemente, o produto em seu uso e finalidade, obrigando o seu descarte;
- Não usar ferramentas ou qualquer tipo de mecanismo que não seja o manual para proceder com as conexões do produto;
- Não usar tampas protetoras com dispositivos luer no Septo de silicone
- Proibido reprocessar;
- Em uso não assistido usar conexões Luer Lock;
- Trocar o Conector livre de agulhas Infusão de acordo com o período especificado por protocolo da Instituição sempre observando a legislação vigente.
- Nunca utilizar o produto com a embalagem violada e/ou validade vencida;
- Fazer uma inspeção visual no produto antes de utilizá-lo;
- Evitar adaptações inadequadas e/ou improvisos no uso do produto;
- **Prazo de validade:** 05 anos
- **Método de esterilização:** Gás óxido de etileno