

ADAPTADOR PARA EQUIPO DIETA ENTERAL ENPLUS

MODO DE USO DO PRODUTO

O adaptador para equipo dieta enteral Enplus é compatível e se conecta com equipos para dieta enteral e bolsas com dietas enteral.

ADAPTADOR PARA EQUIPO DIETA ENTERAL ENPLUS

- Verificar a validade do produto e a integridade da embalagem, só abri-la no local adequado e em condições assépticas de manipulação;
- Abrir a embalagem e remover o adaptador para equipo dieta enteral;
- Retirar o protetor da ponta perfurante e introduzi-la no recipiente contendo a dieta enteral com o orifício de encaixe (recipiente com dieta enteral) voltado para cima;
- Introduzir a ponta até o final da área de conexão do recipiente com dieta enteral;
- Girar no sentido horário a conexão rotativa para fixação da ponta ao recipiente com dieta enteral;
- Girar o lacre do adaptador para remove - lo;
- Conectar a ponta perfurante do equipo enteral no adaptador até romper a membrana interna e a ponta estar fixada no adaptador.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Temperatura: +10°C a +40°C

Umidade Relativa: 30% a 85%

Empilhamento máximo de 20 (vinte) caixas

Conservar o produto em local limpo e seco.

Não submeter as caixas contendo os produtos a impactos, pois pode danificar os produtos;

A Infusão mantém procedimentos para manuseio, armazenamento, embalagem e expedição de produtos finais, a fim de assegurar que as atividades relacionadas sejam executadas de forma a evitar danos ou deterioração do produto.

Devem ser transportados em veículos seguros e apropriados, de modo a garantir a inviolabilidade e a integridade das embalagens.

CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO, ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Utilizar técnica asséptica para abrir o produto. O profissional deve fazer a assepsia das mãos para evitar a contaminação do produto.

Abrir a embalagem primária somente na hora do uso e utilizá-lo em local adequado;

Descartar imediatamente após o uso;

Após o uso, descartar todos os materiais utilizados em local apropriado para materiais potencialmente contaminados, pois possui potenciais riscos de contaminação biológica. Cada instituição deve se valer de procedimentos de recolhimento, armazenamento e descarte próprio de

seus resíduos sólidos, seguindo as normas instituídas.

Proibido reprocessar.

Nunca utilizar o produto com a embalagem violada e/ou validade vencida;

Fazer uma inspeção visual no produto antes de utilizá-lo;

Evitar adaptações inadequadas e/ou improvisos no uso do produto;

- **Prazo de validade:** 05 anos

- **Método de esterilização:** Gás óxido de etileno