

INFUSOR PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES E MEDICAMENTOS PARENTERAIS

MODO DE USO DO PRODUTO

MODELOS:

- Infusor 02 e 04 Vias Luer Slip / Infusor 02 e 04 Vias Neo Luer Slip
- Infusor 02 e 04 Vias Luer Slip com Tampas Adicionais / Infusor 02 e 04 Vias Neo Luer Slip com Tampas Adicionais
- Infusor 02 e 04 Vias Luer Slip com clamp / Infusor 02 e 04 Vias Neo Luer Slip com clamp
- Infusor 02 e 04 Vias Luer Slip com Tampas Adicionais com clamp / Infusor 02 e 04 Vias Neo Luer Slip com Tampas Adicionais com clamp
- Infusor 02 Vias Luer Slip com clamp 20 cm / Infusor 02 Vias Neo Luer Slip com clamp 20 cm

Modo de Uso:

- Verificar a validade do produto e a integridade da embalagem;
- Abrir a embalagem somente no local adequado e em condições assépticas de manipulação;
- Abrir a embalagem e remover o infusor;
- Retirar o protetor do conector fêmea do infusor;
- Introduzir firmemente o conector macho do sistema de infusão no conector fêmea do infusor;
- Retirar o protetor do conector macho Luer Slip do infusor;
- Fazer a escovação do sistema;
- Conectar o conector macho Luer Slip do infusor, introduzindo-o firmemente no conector fêmea do sistema de infusão, dando uma leve torção. Para interromper o fluxo da solução, utilizar o clamp corta-fluxo quando houver;

MODELOS:

- Infusor 02 e 04 Vias Luer Slip Protetor com Filtro / Infusor 02 e 04 Vias Neo Luer Slip Protetor com Filtro
- Infusor 02 e 04 Vias Luer Slip Protetor com Filtro com Tampas Adicionais / Infusor 02 e 04 Vias Neo Luer Slip Protetor com Filtro com Tampas Adicionais
- Infusor 02 e 04 Vias Luer Slip Protetor com Filtro com clamp / Infusor 02 e 04 Vias Neo Luer Slip Protetor com Filtro com clamp
- Infusor 02 e 04 Vias Luer Slip Protetor com Filtro com Tampas Adicionais com clamp / Infusor 02 e 04 Vias Neo Luer Slip Protetor com Filtro com Tampas Adicionais com clamp

Modo de Uso:

- Verificar a validade do produto e a integridade da embalagem;
- Abrir a embalagem somente no local adequado e em condições assépticas de manipulação;
- Abrir a embalagem e remover o infusor;
- Retirar o protetor do conector fêmea do infusor;
- Introduzir firmemente o conector macho do sistema de infusão no conector fêmea do infusor;
- Fazer a escovação do sistema sem retirar o protetor com filtro do conector macho do infusor;
- Retirar o protetor do conector macho Luer Slip do infusor;
- Conectar o conector macho Luer Slip do infusor, introduzindo-o firmemente no conector fêmea do sistema de infusão, dando uma leve torção. Para interromper o fluxo da solução, utilizar o clamp corta-fluxo quando houver;

MODELOS:

Infusor 02 e 04 Vias Spin Lock / Infusor 02 e 04 Vias Neo Spin Lock

Infusor 02 e 04 Vias Spin Lock com Tampas Adicionais / Infusor 02 e 04 Vias Neo Spin Lock com Tampas Adicionais

Infusor 02 e 04 Vias Spin Lock com clamp / Infusor 02 e 04 Vias Neo Spin Lock com clamp

Infusor 02 e 04 Vias Spin Lock com Tampas Adicionais com clamp / Infusor 02 e 04 Vias Neo Spin Lock com Tampas Adicionais com clamp

Modo de Uso:

- Verificar a validade do produto e a integridade da embalagem;
- Abrir a embalagem somente no local adequado e em condições assépticas de manipulação;
- Abrir a embalagem e remover o infusor;
- Retirar o protetor do conector fêmea do infusor;
- Introduzir firmemente o conector macho do sistema de infusão no conector fêmea do infusor;
- Retirar o protetor do conector macho Spin Lock do infusor;
- Fazer a escovação do sistema;
- Conectar o conector macho Spin Lock do infusor, introduzindo-o firmemente no conector fêmea do sistema de infusão, dando uma leve torção e girar a luva rotativa no sentido horário para melhor fixar a conexão. Para interromper o fluxo da solução utilizar o clamp corta-fluxo quando houver;

MODELOS:

Infusor 02 e 04 Vias Spin Lock Protetor com Filtro

Infusor 02 e 04 Vias Spin Lock Protetor com Filtro com Tampas Adicionais

Infusor 02 e 04 Vias Spin Lock Protetor com Filtro com clamp

Infusor 02 e 04 Vias Spin Lock Protetor com Filtro com Tampas Adicionais com clamp

Infusor 02 e 04 Vias Neo Spin Lock Protetor com Filtro

Infusor 02 e 04 Vias Neo Spin Lock Protetor com Filtro com Tampas Adicionais

Infusor 02 e 04 Vias Neo Spin Lock Protetor com Filtro com clamp

Infusor 02 e 04 Vias Neo Spin Lock Protetor com Filtro com Tampas Adicionais com clamp

Modo de Uso:

- Verificar a validade do produto e a integridade da embalagem;
- Abrir a embalagem somente no local adequado e em condições assépticas de manipulação;
- Abrir a embalagem e remover o infusor;
- Retirar o protetor do conector fêmea do infusor;
- Introduzir firmemente o conector macho do sistema de infusão no conector fêmea do infusor;
- Fazer a escovação do sistema sem retirar o protetor com filtro do conector macho do infusor;
- Retirar o protetor do conector macho Spin Lock do infusor;
- Conectar o conector macho Spin Lock do infusor, introduzindo-o firmemente no conector fêmea do sistema de infusão, dando uma leve torção e girar a luva rotativa no sentido horário para melhor fixar a conexão. Para interromper o fluxo da solução utilizar o clamp corta-fluxo quando houver;

MODELOS:

- Infusor 02 e 04 Vias conector Valvulado Luer Slip com clamp / Infusor 02 e 04 Vias Neo conector Valvulado Luer Slip com clamp
- Infusor 02 e 04 Vias conector Valvulado Luer Slip com Tampas Adicionais com clamp / Infusor 02 e 04 Vias Neo conector Valvulado Luer Slip com Tampas Adicionais com clamp

Modo de Uso:

- Verificar a validade do produto e a integridade da embalagem;
- Abrir a embalagem somente no local adequado e em condições assépticas de manipulação;
- Abrir a embalagem e remover o infusor;
- Introduzir firmemente o conector macho do sistema de infusão no conector Valvulado do infusor dando uma leve torção;
- Retirar o protetor do conector macho Luer Slip do infusor;
- Fazer a escovação do sistema;
- Conectar o conector macho Luer Slip do infusor, introduzindo-o firmemente no conector fêmea do sistema de infusão, dando uma leve torção.

Para interromper o fluxo da solução utilizar o clamp corta-fluxo quando houver.

MODELOS:

- Infusor 02 e 04 Vias conector Valvulado Luer Slip Protetor com Filtro com clamp / Infusor 02 e 04 Vias Neo conector Valvulado Luer Slip Protetor com Filtro com clamp
- Infusor 02 e 04 Vias conector Valvulado Luer Slip Protetor com Filtro com Tampas Adicionais com clamp / Infusor 02 e 04 Vias Neo conector Valvulado Luer Slip Protetor com Filtro com Tampas Adicionais com clamp

Modo de Uso:

- Verificar a validade do produto e a integridade da embalagem;
- Abrir a embalagem somente no local adequado e em condições assépticas de manipulação;
- Abrir a embalagem e remover o infusor;
- Introduzir firmemente o conector macho do sistema de infusão no conector Valvulado do infusão dando uma leve torção;
- Fazer a escovação do sistema sem retirar o protetor com filtro do conector macho do infusor;
- Retirar o protetor do conector macho Luer Slip do infusor;
- Conectar o conector macho Luer Slip do infusor, introduzindo-o firmemente no conector fêmea do sistema de infusão, dando uma leve torção. Para interromper o fluxo da solução utilizar o clamp corta-fluxo quando houver.

MODELOS:

Infusor 02 e 04 Vias conector Valvulado Spin Lock com clamp / Infusor 02 e 04 Vias Neo conector Valvulado Spin Lock com clamp

Infusor 02 e 04 Vias conector Valvulado Spin Lock com Tampas Adicionais com clamp / Infusor 02 e 04 Vias Neo conector Valvulado Spin Lock com Tampas Adicionais com clamp

Modo de Uso:

- Verificar a validade do produto e a integridade da embalagem;
- Abrir a embalagem somente no local adequado e em condições assépticas de manipulação;
- Abrir a embalagem e remover o infusor;
- Introduzir firmemente o conector macho do sistema de infusão no conector Valvulado do infusão dando uma leve torção;
- Retirar o protetor do conector macho Spin Lock do infusor;

- Fazer a escovação do sistema;
- Conectar o conector macho Spin Lock do infusor, introduzindo-o firmemente no conector fêmea do sistema de infusão, dando uma leve torção e girar a luva rotativa no sentido horário para melhor fixar a conexão. Para interromper o fluxo da solução utilizar o clamp corta-fluxo quando houver.

MODELOS:

Infusor 02 e 04 Vias conector Valvulado Spin Lock Protetor com Filtro com clamp

Infusor 02 e 04 Vias conector Valvulado Spin Lock Protetor com Filtro com Tampas Adicionais com clamp

Infusor 02 e 04 Vias Neo conector Valvulado Spin Lock Protetor com Filtro com clamp

Infusor 02 e 04 Vias Neo conector Valvulado Spin Lock Protetor com Filtro com Tampas Adicionais com clamp

Modo de Uso:

- Verificar a validade do produto e a integridade da embalagem;
- Abrir a embalagem somente no local adequado e em condições assépticas de manipulação;
- Abrir a embalagem e remover o infusor;
- Introduzir firmemente o conector macho do sistema de infusão no conector Valvulado do infusor dando uma leve torção;
- Fazer a escovação do sistema sem retirar o protetor do conector macho do infusor com Filtro;
- Retirar o protetor do conector macho Spin Lock do infusor;
- Conectar o conector macho Spin Lock do infusor, introduzindo-o firmemente no conector fêmea do sistema de infusão, dando uma leve torção e girar a luva rotativa no sentido horário

para melhor fixar a conexão. Para interromper o fluxo da solução utilizar o clamp corta-fluxo quando houver.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Temperatura: +10°C a +40°C

Umidade Relativa: 30% a 85%

Empilhamento máximo de 10 (dez) caixas

Conservar o produto em local limpo e seco.

Não submeter as caixas contendo os produtos a impactos, pois pode danificar os produtos;

A Infusão mantém procedimentos para manuseio, armazenamento, embalagem e expedição de produtos finais, a fim de assegurar que as atividades relacionadas sejam executadas de forma a evitar danos ou deterioração do produto.

Devem ser transportados em veículos seguros e apropriados, de modo a garantir a inviolabilidade e a integridade das embalagens.

CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO, ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

- Utilizar técnica asséptica para abrir o produto. O profissional deve fazer a assepsia das mãos para evitar a contaminação do produto.

- Abrir a embalagem primária somente na hora do uso e utilizá-lo em local adequado;

- Descartar imediatamente após o uso: após o uso, descartar todos os materiais utilizados em local apropriado para materiais potencialmente contaminados, devido aos potenciais riscos de contaminação biológica. Cada instituição deve se valer de procedimentos de recolhimento, armazenamento e descarte próprio de seus resíduos sólidos, seguindo as normas instituídas.

Não reutilizar o produto; O fabricante recomenda o uso único;

A perfuração do tubo pode provocar embolia gasosa;

Nunca utilizar o produto com a embalagem violada e/ou validade vencida;

Fazer uma inspeção visual no produto antes de utilizá-lo;

Evitar adaptações inadequadas e/ou improvisos no uso do produto;

- **Prazo de validade:** 05 anos

- **Método de esterilização:** Gás óxido de etileno