

EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL

MODO DE USO DO PRODUTO

EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL

- Verificar a validade do produto e a integridade da embalagem, só abri-la no local adequado e em condições assépticas de manipulação;
- Abrir a embalagem e remover o equipo para alimentação enteral;
- Retirar o protetor da ponta perfurante e introduzi-la no recipiente contendo a alimentação enteral com o orifício de encaixe (recipiente com alimentação enteral) voltado para cima;
- Fechar o regulador de fluxo e posicionar o conjunto equipo-recipiente no suporte;
- Retirar o protetor do conector na extremidade inferior do equipo, abrir o regulador de fluxo (clamp + rolete) e deixar a solução percorrer toda a extensão do equipo para retirada do ar existente;
- Fechar o regulador de fluxo (clamp + rolete);
- Conectar o conector escalonado, introduzindo-o firmemente na sonda instalada no paciente.
- Após conectar o equipo a sonda, regular o fluxo da infusão da dieta, ajustando o dispositivo clamp+ rolete.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Temperatura: +10°C a +40°C

Umidade Relativa: 30% a 85%

Empilhamento máximo de dez caixas

Conservar o produto em local limpo e seco.

Não submeter as caixas contendo os produtos a impactos, pois pode danificar os produtos;

A Infusão mantém procedimentos para manuseio, armazenamento, embalagem e expedição de produtos finais, a fim de assegurar que as atividades relacionadas sejam executadas de forma a evitar danos ou deterioração do produto.

Devem ser transportados em veículos seguros e apropriados, de modo a garantir a inviolabilidade e a integridade das embalagens.

CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO, ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Utilizar técnica asséptica para abrir o produto. O profissional deve fazer a assepsia das mãos para evitar a contaminação do produto.

Abrir a embalagem primária somente na hora do uso e utilizá-lo em local adequado;

Descartar imediatamente após o uso;

Proibido reprocessar.

Nunca utilizar o produto com a embalagem violada e/ou validade vencida;

Fazer uma inspeção visual no produto antes de utilizá-lo;

Evitar adaptações inadequadas e/ou improvisos no uso do produto;

- **Prazo de validade:** 05 anos

- **Método de esterilização:** Gás óxido de etileno