

EXTENSOR PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES E/OU MEDICAMENTOS PARENTERAIS

MODO DE USO DO PRODUTO

Extensor para infusão

- Verificar a validade do produto e a integridade da embalagem, só abri-la no local adequado e em condições assépticas de manipulação;
- Abrir a embalagem e remover o extensor;
- Retirar o Protetor do Conector Fêmea do Extensor;
- Conectar o Conector Luer Slip Macho do sistema de infusão, introduzindo-o firmemente no Conector Fêmea do Extensor. Caso o modelo do Conector Macho do sistema de infusão seja Spin Lock girar a luva rotativa no sentido horário para fixar a conexão e se for Luer Lock girar o conector macho no sentido horário para fixar a conexão;
- Retirar o Protetor do Conector Macho do Extensor;
- Fazer a escovação do sistema;
- Conectar o Conector Luer Slip Macho do Extensor, introduzindo-o firmemente no Conector Fêmea do dispositivo intravenoso (escalpe, cateter, etc). Nos modelos Spin Lock, girar a luva rotativa no sentido horário para fixar a conexão e nos modelos Luer Lock, girar o conector macho no sentido horário para fixar a conexão;

Extensor para infusão com Protetor do Conector Macho com Filtro

- Verificar a validade do produto e a integridade da embalagem, só abri-la no local adequado e em condições assépticas de manipulação;
- Abrir a embalagem e remover o extensor;
- Retirar o Protetor do Conector Fêmea do Extensor;
- Conectar o Conector Luer Slip Macho do sistema de infusão, introduzindo-o firmemente no Conector Fêmea do Extensor. Caso o modelo do Conector Macho do sistema de infusão seja Spin Lock girar a luva rotativa no sentido horário para fixar a conexão e se for Luer Lock girar o conector macho no sentido horário para fixar a conexão;
- Fazer a escovação do sistema;
- Retirar o Protetor do Conector Macho do Extensor;

- Conectar o Conector Luer Slip Macho do Extensor, introduzindo-o firmemente no Conector Fêmea do dispositivo intravenoso (escalpe, cateter, etc). Nos modelos Spin Lock, girar a luva rotativa no sentido horário para fixar a conexão e nos modelos Luer Lock, girar o conector macho no sentido horário para fixar a conexão;
- O EXTENSOR PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES E/OU MEDICAMENTOS PARENTERAIS em sua composição é livre de BPA (Bisfenol A), DEHP (Di 2-etilhexil-ftalato) e Látex;

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Temperatura: +10°C a +40°C

Umidade Relativa: 30% a 85%

Empilhamento máximo de dez caixas

Conservar o produto em local limpo e seco.

Não submeter as caixas contendo os produtos a impactos, pois pode danificar os produtos;

A Infusão mantém procedimentos para manuseio, armazenamento, embalagem e expedição de produtos finais, a fim de assegurar que as atividades relacionadas sejam executadas de forma a evitar danos ou deterioração do produto.

Devem ser transportados em veículos seguros e apropriados, de modo a garantir a inviolabilidade e a integridade das embalagens.

CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO, ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Utilizar técnica asséptica para abrir o produto. O profissional deve fazer a assepsia das mãos para evitar a contaminação do produto.

Abrir a embalagem primária somente na hora do uso e utilizá-lo em local adequado;

Descartar imediatamente após o uso;

Não reutilizar o produto; O fabricante recomenda o uso único;

A perfuração do tubo pode provocar embolia gasosa;

Nunca utilizar o produto com a embalagem violada e/ou validade vencida;

Fazer uma inspeção visual no produto antes de utilizá-lo;



Evitar adaptações inadequadas e/ou improvisos no uso do produto;

- **Prazo de validade:** 05 anos
- **Método de esterilização:** Gás óxido de etileno

INFUSÃO HOSPITALAR

Av.:Deputado Luís Eduardo Magalhães,Km 523,S/Nº - Bairro Subaé
Feira de Santana - BA - Brasil - CEP 44079-002
Tel.:+55 75 3626-7521 - E-mail:infusao@infusaohospitalar.com.br