

## PROTETORES

## MODO DE USO DO PRODUTO

### MODELO:

Protetor do Conector Luer lock fêmea

### MODO DE USO:

- Verificar a validade do produto e a integridade da embalagem, só abri-la no local adequado e em condições assépticas de manipulação;
- Conectar o protetor ao conector luer fêmea e em seguida rosquear para vedação;

### MODELO:

Protetor do Conector Luer Lock fêmea para hemodiálise:

- Verificar a validade do produto e a integridade da embalagem, só abri-la no local adequado e em condições assépticas de manipulação;
  - Conectar o protetor ao conector luer fêmea e em seguida rosquear para vedação
- Vedar o protetor azul para sangue venoso e o protetor vermelho para sangue arterial.

### MODELO:

Protetor do conector luer macho

### Modo de uso:

- Verificar a validade do produto e a integridade da embalagem, só abri-la no local adequado e em condições assépticas de manipulação;
- Conectar o protetor ao conector luer macho.

## CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Temperatura: +10°C a +40°C

Umidade Relativa: 30% a 85%

Empilhamento máximo de 20 (vinte) caixas

Conservar o produto em local limpo e seco.

Não submeter as caixas contendo os produtos a impactos, pois pode danificar os produtos;

A Infusão mantém procedimentos para manuseio, armazenamento, embalagem e expedição de produtos finais, a fim de assegurar que as atividades relacionadas sejam executadas de forma a evitar danos ou deterioração do produto.

Devem ser transportados em veículos seguros e apropriados, de modo a garantir a inviolabilidade e a integridade das embalagens.

## CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO, ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Utilizar técnica asséptica para abrir o produto. O profissional deve fazer a assepsia das mãos para evitar a contaminação do produto.

Abrir a embalagem primária somente na hora do uso e utilizá-lo em local adequado;



Após o uso, acondicionar o produto utilizado em local apropriado definido pela Instituição de saúde.

O fabricante recomenda o uso único.

Nunca utilizar o produto com a embalagem violada e/ou validade vencida;

Fazer uma inspeção visual no produto antes de utilizá-lo;

Evitar adaptações inadequadas e/ou improvisos no uso do produto;

- **Prazo de validade:** 05 anos

- **Método de esterilização:** Gás óxido de etileno

## INFUSÃO HOSPITALAR

Av.:Deputado Luís Eduardo Magalhães,Km 523,S/Nº - Bairro Subaé  
Feira de Santana - BA - Brasil - CEP 44079-002  
Tel.:+55 75 3626-7521 - E-mail:infusao@infusaohospitalar.com.br