

DISPOSITIVO PARA TRANSFERENCIA DE FLUIDOS

MODO DE USO DO PRODUTO

MODELOS:

Dispositivo para transferência de fluidos estéreis:

Retirar o produto da embalagem utilizando técnica asséptica. Retirar o protetor da ponta perfurante e conectar ao recipiente de fluidos estéreis que se deseja utilizar nas irrigações.

MODO DE USO:

Dispositivo para transferência de fluidos estéreis dupla ponta:

Retirar o produto da embalagem utilizando técnica asséptica. Retirar os protetores das pontas perfurantes e conectar ambas pontas perfurantes do dispositivo aos recipientes de fluidos estéreis que se deseja transferir, misturar ou diluir.

"DISPOSITIVO PARA TRANSFERÊNCIA DE NUTRIÇÃO"

"RETIRAR O PRODUTO DA EMBALAGEM UTILIZANDO TÉCNICA ASSÉPTICA. RETIRAR O PROTETOR DA PONTA PERFURANTE ENPLUS E CONECTAR AO RECIPIENTE COM NUTRIÇÃO ENTERAL. GIRAR NO SENTIDO HORÁRIO A CONEXÃO ROTATIVA PARA FIXAÇÃO DA PONTA AO RECIPIENTE COM NUTRIÇÃO ENTERAL. TRANSFERIR A NUTRIÇÃO ENTERAL PARA OUTRO RECIPIENTE".

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Temperatura: +10°C a +40°C

Umidade Relativa: 30% a 85%

Empilhamento máximo de 20 (vinte) caixas

Conservar o produto em local limpo e seco.

Não submeter as caixas contendo os produtos a impactos, pois pode danificar os produtos;

A Infusão mantém procedimentos para manuseio, armazenamento, embalagem e expedição de produtos finais, a fim de assegurar que as atividades relacionadas sejam executadas de forma a evitar danos ou deterioração do produto.

Devem ser transportados em veículos seguros e apropriados, de modo a garantir a inviolabilidade e a integridade das embalagens.

CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO, ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Utilizar técnica asséptica para abrir o produto. O profissional deve fazer a assepsia das mãos para evitar a contaminação do produto.

Abrir a embalagem primária somente na hora do uso e utilizá-lo em local adequado;

Após o uso, acondicionar o produto utilizado em local apropriado definido pela Instituição de saúde.

O fabricante recomenda o uso único.

Nunca utilizar o produto com a embalagem violada e/ou validade vencida;

Fazer uma inspeção visual no produto antes de utilizá-lo;

Evitar adaptações inadequadas e/ou improvisos no uso do produto;

- **Prazo de validade:** 05 anos

- **Método de esterilização:** Gás óxido de etileno